

Cortisol, salivary

תיאור הבדיקה

קוד CPT

807281

שם הבדיקה

Cortisol, salivary

שמות נוספים לבדיקה

קורטיזול ברוק

לאבחנה/טיפול

למידע על הבדיקה לחץ: מעבדה אנדוקרינית שיבא - בדיקות מיוחדות

שיטת ביצוע הבדיקה

Electro-chemi-luminescence-immunoassay (ECLIA)

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[אנדוקרינולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בנין מטבוליים אנדוקרינולוגיה וסוכרתקומה 4

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302801

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

אנדוקרינולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

--

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

בתאום עם המעבדה

סוג הדגימה

רוק

נפח דגימה

3 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מתקן לאיסוף רוק הניתן ע"י המעבדה

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

יש לקחת בשעות מסוימות על פי דף הוראות שניתן ע"י המעבדה. ניתן לאחסן את המתקן עם הרוק עד 24 שעות במקרר. לזמנים ארוכים יותר יש להקפיא את המתקן

תנאי שינוע

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

--

קריאת תוצאות

מידע כללי

המעבדה אינה מספקת אינטרפטציה קלינית לתוצאות הבדיקה. לקבלת חוות דעת רפואית יש לפנות לגורם רפואי מוסמך.

יחידת מידה

nmol/L

תחום ערכים תקינים

בשעות 0-7.56 :23:30-00:30

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

NEQAS, RCPA-Chemical Pathology

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 3 ימי עבודה ובהתאם לדחיפות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות