

Renin Direct

תיאור הבדיקה

CPT קוד

84244

שם הבדיקה

Renin Direct

שמות נוספים לבדיקה

רנין

לאבחנה/טיפול

1. מבוצע כחלק מאבחון ובירור של יתר לחץ-דם (בעיקר במצבים של רמות אשלגן בדם נמוכות).
מדידתו עשויה לעזור להחלטה על סוג הטיפול התרופתי המיטבי. 2. ברור אפשרות של גידול בבלוטת
האדרנל. 3. בדיקת רנין מבוצעת פעמים רבות ביחד עם בדיקת אלדוסטרון, שכן רמה גבוהה/נמוכה של
אחד מהם או שניהם עלולה להעיד על מחלות שונות.

שיטת ביצוע הבדיקה

Chemiluminesce/Immunoassay

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[אנדוקרינולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בנין מטבוליזם אנדוקרינולוגיה וסוכרתקומה 4

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302801

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

אנדוקרינולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

--

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

מצב זקוף/מאמץ: לפחות שעה של הסתובבות או הליכה. מצב שכיבה/מנוחה: לפחות 15 דקות של שכיבה.

סוג הדגימה

דם מלא

נפח דגימה

למלא עד הקו המסומן על המבחנה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ספירה (EDTA) פקק סגול.

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לציין מצב הנבדק (במצב זקוף/במאמץ או בשכיבה/במנוחה).

תנאי שינוע

לקיחת הדגימה ושינועה יתבצע בטמפרטורת החדר- אין לקרר את הדגימה!! שינוע הדגימה ביום לקיחת הדגימה בלבד! אי עמידה בתנאי זה תביא לפסילת הדגימה. גורמים מחוץ לבית החולים: יש להפריד את הפלזמה ולהקפיא. חשוב כי הדגימות יגיעו קפואות למעבדה. חשוב מאוד: אין לקרר את הדגימה בשום שלב מהלקיחה ועד הקפאת הפלזמה!!!

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

--

קריאת תוצאות

מידע כללי

המעבדה אינה מספקת אינטרפטציה קלינית לתוצאות הבדיקה. לקבלת חוות דעת רפואית יש לפנות לגורם רפואי מוסמך.

יחידת מידה

mU/l

תחום ערכים תקינים

במצב זקוף/במאמץ: 1.46-4.4 בשכיבה/מנוחה: 9.39-2.8 ילדים עד גיל 12:3.4-64

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

EQAS Immunoassay (Monthly) Program

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 5 ימי עבודה ובהתאם לדחיפות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות