

Dopamine, 24 Hour, Urine

תיאור הבדיקה

CPT קוד

82382

שם הבדיקה

Dopamine, 24 Hour, Urine

שמות נוספים לבדיקה

Catecholamines, Urine, 24 שעות שتن באיסוף, דופמין

לאבחנה/טיפול

Diagnosis of adrenal gland issues, pheochromocytoma, and other neuroendocrine disorders

שיטת ביצוע הבדיקה

LCMSMS

מגבלות השיטה

requires a timed collection for accurate results

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מטבולית \(ביוכימיה קלינית\)](#)

מיקום המעבדה

אגף מעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302553

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

על-אוטומטית

המעבדה הקולטת את הדגימה

יש לשלוח אנמנזה כולל רשימת תרופות

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

יש להימנע ממזון ותרופות העלולים להשפיע על רמת האנליטים הנמדדים תוך התייעצות עם הרופא המטפל.

סוג הדגימה

איסוף שתן, יש לציין זמן ונפח השתן שנאסף

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מיכל פלסטיק לאיסוף שתן של 24 שעות תוסף: HCl מרוכז 6N

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

קירור, מוגן מאור

תנאי שינוע

קירור, מוגן מאור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

חודשיים

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

$\mu\text{g}/24\text{h}$

תחום ערכים תקינים

ערכים תלויי גיל

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיזונית

Instand Biogenic Amines

בקרת איכות חיזונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

42 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות