

Guanidinoacetate, Random Urine

תיאור הבדיקה

CPT קוד

83918

שם הבדיקה

Guanidinoacetate, Random Urine

שמות נוספים לבדיקה

אקראי בשתן אצטאט-גואנידינו, GAA

לאבחנה/טיפול

Identification and monitoring inborn errors of metabolism involving creatine synthesis and transport. Diagnosis of AGAT, GAMT deficiencies and creatine transporter disorders. Investigation of Neurological symptoms, like developmental delay, seizures, speech impairment

שיטת ביצוע הבדיקה

LCMSMS

מגבלות השיטה

Inappropriate sample handling.

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מטבולית \(ביוכימיה קלינית\)](#)

מיקום המעבדה

אגף מעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302553

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

על-אוטומטית

המעבדה הקולטת את הדגימה

יש לשלוח אנמנזה כולל רשימת תרופות ומצב המטופל בעת לקיחת הדגימה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

דיגום אחרי צום 12 שעות, מתחת לגיל שנתיים יש לדגום לפני האכלה

סוג הדגימה

שתן אקראי

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה לדיגום שתן ללא תוסף אטומה לאור

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

יש להקפיא מיד את הדגימה ולהגן מאור

תנאי שינוע

הקפאה והגנה מאור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

31 יום

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

mmol/mol creatinine

תחום ערכים תקינים

ערכים תלויי גיל

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

ERNDIM special assays urine

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

28 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות