

# Normethanephrine, Plasma

## תיאור הבדיקה

### **CPT קוד**

82382

### **שם הבדיקה**

Normethanephrine, Plasma

### **שמות נוספים לבדיקה**

פלזמה, נורמטאנפרין, Metanephrines, Plasma

### **לאבחנה/טיפול**

Diagnosis of neuroendocrine tumors that secrete catecholamines, such as pheochromocytomas and paragangliomas. Evaluation of Hypertension with Suspected Catecholamine Excess. Screening in High-Risk Populations, in individuals at higher risk of developing pheochromocytomas/paragangliomas.

### **שיטת ביצוע הבדיקה**

LCMSMS

### **מגבלות השיטה**

Inappropriate sample handling. Certain drugs can influence the test results.

## פרטי מעבדה מבצעת

## מעבדה מבצעת

מטבולית (ביוכימיה קלינית)

## מיקום המעבדה

אגף מעבדות קומת קרקע

## טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302553

## מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

על-אוטומטית

## המעבדה הקולטת את הדגימה

יש לשלוח אנמנזה כולל רשימת תרופות

## האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

## דיגום ושינוע הבדיקה

### תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

יש לקחת דגימת דם מנבדק/ת במצב שכיבה אחרי 20-30 דקות מנוחה, בבוקר, לאחר צום לילה. אין לאכול מזונות שעשויים להעלות את רמת המטנפרינים בדם.

### סוג הדגימה

פלזמה

**נפח דגימה**

שתי מבחנות דם 5 מ"ל

**כלי קיבול לדגימה**

מבחנה פקק סגול

**תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע**

דגימה: יש להפריד פלסמה, להקפיא ולהגן מאור. יש לשלוח אנמנזה

**תנאי שינוע**

קירור, מוגן מאור

**זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה**

חודשיים

**קריאת תוצאות**

**מידע כללי**

**יחידת מידה**

nmol/liter

**תחום ערכים תקינים**

0.12-1.1

בקורות ותקני איכות

**EQA - בקרת איכות חיזונית**

RCPAQAP Plasma Metanephrines

**בקרת איכות חיזונית חלופית**

**הסמכה/התעדה**

**שם הגוף המסמיך/מתעיד**

מועדי דיגום ותוצאות

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

28 ימי עבודה

**ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות