

# Pyruvic acid, Blood

## תיאור הבדיקה

**קוד CPT**

83605

## **שם הבדיקה**

Pyruvic acid, Blood

## **שמות נוספים לבדיקה**

דם, פירובית חומצה, Pyruvate

## **לאבחנה/טיפול**

Assessment of Pyruvate Metabolism Disorders, Investigation of unexplained symptoms (muscle weakness, fatigue, neurological symptoms)

## **שיטת ביצוע הבדיקה**

Enzymatic, Endpoint, Spectrophotometry

## **מגבלות השיטה**

Influenced by physical activity or inappropriate sample handling.

## פרטי מעבדה מבצעת

## מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

## מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

## טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לבירורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

## מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

על-אוטומטית

## המעבדה הקולטת את הדגימה

יש לשלוח אנמנזה כולל רשימת תרופות

## האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

## דיגום ושינוע הבדיקה

### תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

נבדק: בצום לילה, דיגום בישיבה

### סוג הדגימה

דם מלא

## נפח דגימה

1 מ"ל בדיוק

## כלי קיבול לדגימה

מבחנת דיגום מבחנה יעודית לבדיקה: תוסף: 0.5 מ"ל 8% acid perchloric

## תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

יש להוסיף 1 מיליליטר דם בדיוק למבחנת החומצה. לערבב היטב בקור, לסרכז ולהפריד את הנוזל העליון. להקפיא ולשלוח קפוא.

## תנאי שינוע

הקפאה

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

חודש

## קריאת תוצאות

### מידע כללי

### יחידת מידה

mmol/L

### תחום ערכים תקינים

0.03-0.08

## בקורות ותקני איכות

### **EQA - בקרת איכות חיצונית**

ERNDIM special assays serum

### **בקרת איכות חיצונית חלופית**

### **הסמכה/התעדה**

ISO15189

### **שם הגוף המסמך/מתעיד**

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

## מועדי דיגום ותוצאות

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

7 ימי עבודה

### **ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

בימי חול בין השעות 7:00 עד 15:00

## הערות

### **הערות**

הבדיקה מבוצעת במעבדה העל אוטומטית החל מה-13.7.25

