

MPS

תיאור הבדיקה

קוד CPT

83866

שם הבדיקה

MPS

שמות נוספים לבדיקה

מוקופוליסכרידים בשתן

לאבחנה/טיפול

Screening Tests for mucopolysaccharidoses (MPS disorders). Monitoring of treatment for MPS known patients.

שיטת ביצוע הבדיקה

Spectrophotometry

מגבלות השיטה

Not Specific to MPS Type. False Negatives: Some mild forms of MPS or certain MPS types may have normal or near-normal urine GAG levels, leading to false negatives.

Other Conditions: Certain other conditions can sometimes cause mild increases in urine GAGs, which can lead to false positives.

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מטבולית \(ביוכימיה קלינית\)](#)

מיקום המעבדה

אגף מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302553

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

על-אוטומטית

המעבדה הקולטת את הדגימה

יש לשלוח אנמנזה כולל רשימת תרופות

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

יש להימנע מדיגום אחרי מתן heparin weight molecular-low

סוג הדגימה

שתן אקראי שני של בוקר

נפח דגימה

2 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה לדיגום שתן ללא תוסף פקק שקוף

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

קירור

תנאי שינוע

הקפאה

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

חודשיים

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

mg/mmol creatinine

תחום ערכים תקינים

ערכים תלויי גיל

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

ERNDIM

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

30 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות