

# drug resistance

## תיאור הבדיקה

**CPT קוד**

80299

**שם הבדיקה**

drug resistance

**שמות נוספים לבדיקה**

עמידות לתרופות

**לאבחנה/טיפול**

ניטור תגובה לתרופות נוגדות כמו אספירין פלביקס ונגזרותיו

**שיטת ביצוע הבדיקה**

Platelet aggregation (ADP, epinephrine, חומצה, ארכדונית)

**מגבלות השיטה**

במקרים של בדיקה המוליטית או ליפמית או כשיש מתחת ל 100,000 טסיות פוגע ברגישות הבדיקה ובתוצאה

## הערות

**הערות**

1.5mM ארכידונית חומצה 10µM epinephrine 50µM ADP 10µM

פרטי מעבדה מבצעת

**מעבדה מבצעת**

בנק הדם

**מיקום המעבדה**

חדר 112 קומה 0 בתוך בנק הדם

**טלפון למידע, בירורים ותיאום**

03-5302383

**מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה**

נא לשלוח את שתי המבחנות ביחד בשקית ישירות לבנק הדם ידנית או בטיל 100

**המעבדה הקולטת את הדגימה**

בנק הדם

**האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?**

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

### תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

הנבדק חייב להמנע מארוחות שומניות 12 שעות לפני הדגימה. ספירת הטסיות של המטופל חייבת להיות מעל 100,000.

#### סוג הדגימה

דם

#### נפח דגימה

ל"מ 2X3

#### כלי קיבול לדגימה

תכלת פקק ציטרט מבחנות 2x

#### תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לקיחה חלקה, עירבוב על ידי 5 היפוכים בלי הקצפה, בלקיחה כמבחנה ראשונה למלא צינורית. לשלוח מיידית.

#### תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

#### זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

6 שעות

### קריאת תוצאות

#### מידע כללי

הפרשנות של התוצאות היא בסמכות הרופאים בלבד

**יחידת מידה**

% אגרגציה מקסימלית

**תחום ערכים תקינים**

65