

Chromosomes blood (קריוטיפ)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

88230

שם הבדיקה

Chromosomes blood (קריוטיפ)

שמות נוספים לבדיקה

דם כרומוזומי (קריוטיפ)

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

ציטוגנטיקה קלסית

מגבלות השיטה

הערות

הערות

על פי הנחיות ISCN

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

גנטית

מיקום המעבדה

מכון גנטי, בנין נשים יולדות

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5303060

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

מכון גנטי

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

בתאום מראש עם המעבדה או ייעוץ גנטי

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מזרק סטרילי שטוף בהפרין סטרילי

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

טמפ החדר

תנאי שינוע

לפקוק המזרק בפקק סטרילי להעביר בקרור לא בהקפאה בתנאים סטריליים ביום הלקיחה

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

מייד

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

זיהוי שינויים בכרומוזומים

תחום ערכים תקינים

שני כרומוזומים תקינים מכל סוג

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

גאמידור CAP- Cytogen-etics

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד חודשיים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות