

anti-HDV Total

תיאור הבדיקה

קוד CPT

86692

שם הבדיקה

anti-HDV Total

שמות נוספים לבדיקה

נוגדן ל- HDV נוגדן להפטיטיס D

לאבחנה/טיפול

צהבת HDV - בדיקת הימצאות נוגדני IgG נגד נגיף הפטיטיס D, המעידה על מחלה בעבר. נגיף ה-
הנקשרים מעטפת חלבוני לו וחסרים מאחר עצמאי באופן ולהתקיים לתאים לחדור יכול אינו HDV
לתאים בגוף. לכן הוא זקוק לנגיף HBV על מנת להקשר לתאים ולהדביק. לכן, הדבקה בנגיף ה-
HBV -ב להדבקה במקביל או לאחר תרחש HDV.

שיטת ביצוע הבדיקה

ELISA

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[גסטרו](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומה 1 מעל בנק הדם, חדר 258

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302905

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

תוצאות בדיקת HbsAg או DNA-HBV

המעבדה הקולטת את הדגימה

גסטרו

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

יש לשלוח מיידית לאחר הלקיחה לטיל 124. גורמים מחוץ לבית החולים: יש להפריד את הסרום תוך 4 שעות ולהעביר לקרור בטמפ' 2-6. יש לשלוח עם קרח תוך 48 שעות.

תנאי שינוע

אחרי הפרדה, לשלוח תוך 48 שעות בקירור 2-6 מעלות למעבדה. או להקפיא 20- מעלות ולשלוח קפוא תוך שבועיים. אי עמידה בתנאי זה תביא לפסילת הדגימה.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לאחר סירכוז והפרדה ובטמפ' 20c- עד 6 חודשים.

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

AU/ml

תחום ערכים תקינים

חיובי: 1.0/=

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

INSTAND e.V

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

חודש

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות