

Barbiturates screen

תיאור הבדיקה

קוד CPT

82205

שם הבדיקה

Barbiturates screen

שמות נוספים לבדיקה

סריקה לברביטורטים

לאבחנה/טיפול

שימוש בסמים/תרופה- קביעת מוות מוחי (barbiturates total)

שיטת ביצוע הבדיקה

אימונוכימיה

מגבלות השיטה

בדיקה איכותית בסף גילוי של 200 נ"ג/מ"ל. * כל ממצא מתחת לסף הכימות (LOQ) או לסף הגילוי ידווח בטופס התוצאה כ - "לא נמצא" או "שלילי". (בבדיקות משפטיות ערך הסף משתנה ע"פ דרישת הלקוח)

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[טוקסיקולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302358/5

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

טוקסיקולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין

סוג הדגימה

שתן

נפח דגימה

שתן, 10 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

כוסית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

סמוך לזמן החשיפה במקרים של שימוש בסמים/תרופה או לאחר הפסקת מתן התרופה במקרים של קביעת מוות מוחי, בתיאום עם המעבדה/רופא טוקסיקולוג

תנאי שינוע

קרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

לא ישים

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

AA/CC/ CAP URINE DRUG TESTING - CAP-UDS

בקרת איכות חיצונית חלופית

NEQAS drugs of abuse in urine - CC2DOA1A

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022 שנת

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

יום עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בתאום עם המעבדה