

נוזל מניקור (מרה, מורסה, מוגלה, המטומה, ציסטה, פצע ושלפוחית) לתרבית אירובית, אנאירובית ופטריות

תיאור הבדיקה

קוד CPT

8707087205

שם הבדיקה

נוזל מניקור (מרה, מורסה, מוגלה, המטומה, ציסטה, פצע ושלפוחית) לתרבית אירובית, אנאירובית ופטריות

שמות נוספים לבדיקה

Direct aspirate, Bile, Abscess, Pus, Haematoma, Cyst, Wound

לאבחנה/טיפול

חשד לזיהום באתר הנדגם

שיטת ביצוע הבדיקה

תרבית (מצעים מוצקים ומצע נוזלי). צביעת גרם במכשיר Aerospray. זיהוי בשיטת TOF MALDI בשיטת פטריות זיהוי. Disk Diffusion וב-Gradient Test. בשיטות אוטומטית בשיטה רגישות. Bruker. קלאסיות ידניות ובשיטות Bruker במכשיר MALDI TOF.

מגבלות השיטה

משלוח בתנאים אירוביים פוגע בצמיחת חיידקים אנאירוביים. במידה ויש חשד לחיידקים אנאירוביים יש לשלוח דגימה במזרק פקוק. רצוי לא לשלוח במטוש.

הערות

הערות

יש לנקות היטב את אתר הדיקור. יש לדייק את ההזמנה ככל שניתן.

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

יש לבדוק היטב שמוזמן הפרופיל הנכון במסך ההזמנה מרחוק.

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

חיטוי של האזור הנדגם ע"פ הנחיות של היחידה למניעת זיהומים

סוג הדגימה

מרהמורסהמוגלהמטומותציסטהפצע שלפוחית

נפח דגימה

לפחות 5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מזרק פקוק / כוסית / מבחנה סטריליים

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

תנאי שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשרלקוחות חוץ: ביום הדיגום

קריאת תוצאות

מידע כללי

במקרה של מיעוט חומר יש ליצור קשר עם המעבדה לגבי תיעדוף הבדיקות

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

תרבית - תחום הערכים לא ישים. צביעת גרם - תחום הערכים לא ישים. שיטת TOF MALDI - תחום הערכים לא ישים. רגישות בשיטה אוטומטית ובשיטת Disk Diffusion - ניתן לפנות למסמך CLSI M-100: Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing Gradient Test - ניתן לפנות ל-Guide Application Test-E ולהוראות השימוש מצורפות לכל פריט.

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

יש

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

תרבית אירובית, אנאירובית/פטריות שליליות- 7 ימים תרבית אירובית/אנאירובית/פטריות חיובית - 10 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

קליטה 24/7 עיבוד 24/7 תשובת צביעת גרם 16/7