

פצע במטוש

תיאור הבדיקה

קוד CPT

87070

שם הבדיקה

פצע במטוש

שמות נוספים לבדיקה

Surgical wound Pressure ulcer Swab Laceration פצע ניתוחיגום פצע עמוקפצע ניתוחיגום פצע סוכרתיתפצע לחץכוויה

לאבחנה/טיפול

חשד לזיהום באתר הנדגם

שיטת ביצוע הבדיקה

תרבית (מצעים מוצקים). זיהוי בשיטת Bruker TOF MALDI. רגישות בשיטה אוטומטית ובשיטות Disk ידניות ובשיטות Bruker במכשיר MALDI TOF בשיטת פטריות זיהוי. Diffusion וב-Gradient Test. קלאסיות.

מגבלות השיטה

דיגום פצע במטוש אינו מומלץ, יש לנסות לקחת רקמה או לנקות את הפצע, לשטוף עם סליין ולשלוח את נוזל השטיפה במזרק פקוק. בלקיחה במטוש - יש לנקות את הפצע ולדגום עם מטוש בחלק העמוק ביותר, תוך סיבוב המטוש, ללא נגיעה בשולי הפצע. לא יבוצעו ממטוש: משטח גרם, תרבית אנארובית, זריעה לנוזל העשרה

הערות

הערות

דיגום פצע במטוש אינו מומלץ, יש לנסות לקחת רקמה או לנקות את הפצע, לשטוף עם סליין ולשלוח את נוזל השטיפה במזרק פקוק. בלקיחה במטוש - יש לנקות את הפצע ולדגום עם מטוש בחלק העמוק ביותר, תוך סיבוב המטוש, ללא נגיעה בשולי הפצע.

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

יש לציין במדויק את מקום הדיגום במסך ההזמנה מרחוק

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

ניקוי אזור הדיגום מהפרשות, לקיחה מאזור עמוק, מוטרה ונקי

סוג הדגימה

פצע ניתוח (דיגום עמוק) פצע שטחיפצע מרגל סוכרתיתפצע לחץכוויה

נפח דגימה

לא רלוונטי

כלי קיבול לדגימה

מטוש העברה(עם אגר, פקק כחול)

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

תנאי שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשרלקוחות חוץ: ביום הדיגום

קריאת תוצאות

מידע כללי

לא מבוצע משטח גרם ממוטש, לא מבוצעת תרבית אנארובית ממוטש, לא נזרע נוזל העשרה ממוטש

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

תרבית - תחום הערכים לא ישים. שיטת TOF MALDI - תחום הערכים לא ישים. רגישות בשיטה
אוטומטית ובשיטת Disk Diffusion - ניתן לפנות למסמך Standards Performance:100-M CLSI
for Antimicrobial Susceptibility Testing Gradient Test - ניתן לפנות ל-E-Test Application
Guide פריט לכל מצורפות השימוש ולהוראות.

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

יש

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

תרבות אירובית שלילית- 5 ימים תרבות אירובית חיובית - 10 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא