

מטוש מאוזן לתרבית אירובית ופטריות

תיאור הבדיקה

CPT קוד

87070

שם הבדיקה

מטוש מאוזן לתרבית אירובית ופטריות

שמות נוספים לבדיקה

תעלה חיזונית ear Middle ,ear External

לאבחנה/טיפול

חשד לזיהום באתר הנדגם

שיטת ביצוע הבדיקה

תרבית (מצעים מוצקים). צביעת גרם במכשיר Aerospray. זיהוי בשיטת Bruker TOF MALDI. רגישות בשיטה אוטומטית ובשיטות Diffusion Disk וב-Test Gradient. זיהוי פטריות בשיטת TOF MALDI במכשיר Bruker ובשיטות ידניות קלאסיות.

מגבלות השיטה

בדיקה בעלת יעילות מוגבלת בהעדר חשד קליני ספציפי, הצמיחה עשויה לייצג מיקרוביום תקין

הערות

הערות

בהעדר קליניקה תומעת צמיחה יכול לייצד מיקרוביום תקין

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

לא רלוונטי

סוג הדגימה

אוזן חיצונית ימין/אוזן חיצונית שמאל/אוזן תיכונה ימין/אוזן תיכונה שמאל

נפח דגימה

לא רלוונטי

כלי קיבול לדגימה

מטוש העברה(עם אגר, פקק כחול)

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדר/לקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

תנאי שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדר/לקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשר/לקוחות חוץ: ביום הדיגום

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

תרבית - תחום הערכים לא ישים. שיטת TOF MALDI - תחום הערכים לא ישים. רגישות בשיטה
אוטומטית ובשיטת Disk Diffusion - ניתן לפנות למסמך Standards Performance:100-M CLSI
Application for Antimicrobial Susceptibility Testing Gradient Test - ניתן לפנות ל-E-Test
פרוטוקול לכל מצורפות השימוש ולהוראות Guide

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

יש

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

תרבית אירובית, אנאירובית/פטריית שליליות - 3 ימים תרבית אירובית/אנאירובית/פטריית חיובית - 5 ימים



ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא