

Acanthamoeba לתרבית ו-PCR

תיאור הבדיקה

CPT קוד

870708720587250

שם הבדיקה

Acanthamoeba לתרבית ו-PCR

שמות נוספים לבדיקה

Corneal scraping

לאבחנה/טיפול

חשד לזיהום באקנטמבה

שיטת ביצוע הבדיקה

תרבית ו-PCR ל-Acanthamoeba

מגבלות השיטה

מבוצעת תרבית ממבחנת PAGE המנופקת למחלקת עיניים על פי דרישה. PCR מלקוחות פנים וחוץ ניתן לשלוח לאחר דיגום במטוש או סקלפולר במבחנת UTM

הערות

הערות

את מבחנות התרבית יש לשמור בקירור ולהביא לטמפ' חדר לפני הדיגום. רצוי לא להשאיר את הסכין בתוך המבחנה. ל-PCR בלבד ניתן לדגום במטוש למבחנת VTM/UTM

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

יש להכין כלי קיבול מתאימים (PAGE לתרבית, ו-UTM ל-PCR)

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

במידה ויש סיגנל חיובי בבדיקה מולקולרית Sequencing מבוצע במעבדת ריצוף של Hylabs

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

כמקובל ל-scraping corneal

סוג הדגימה

מבוצעת תרבית ממבחנת PAGE המנופקת למחלקת עיניים על פי דרישה. PCR מלקוחות פנים וחוץ ניתן לשלוח לאחר דיגום במטוש או סקלפולר במבחנת UTM

נפח דגימה

כמות מירבית של חומר ביולוגי

כלי קיבול לדגימה

PCR ל-UTM, לתרבית PAGE

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: PAGE טמפרטורת חדר UTM בסביבה מקוררת עד 23°C

תנאי שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: PAGE טמפרטורת חדר UTM בסביבה מקוררת עד 23°C

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשר לקוחות חוץ: ביום הדיגום

קריאת תוצאות

מידע כללי

את מבחנות ה-PAGE ש לשמור במקרר לפני הדיגום יש להביא את המבחנה לטמפרטורת חדר. רצוי לא להשאיר את הסכין בתוך המבחנה. ל-PCR בלבד ניתן לדגום במטוש למבחנת UTM.

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

תרבית - תחום הערכים לא ישים. PCR - שלילי

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

השוואה בין-מעבדתית

הסמכה/התעדה

אין

שם הגוף המסמיך/מתעיד

אין

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

תרבית 10 ימים PCR - 5 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא