

תרבית שתן

תיאור הבדיקה

קוד CPT

87088

שם הבדיקה

תרבית שתן

שמות נוספים לבדיקה

אמצע זרם צנתר Catheter Out/Foley In (SPA) ניקור שלפוחית השתן (SPC) צנתר בשלפוחית
השתן פנרוז שקית שתן לתינוק שתן בזמן ציסטוסקופיה נפרוסטומיה בהכנסת נפרוסטום Ureteral
Midstream מכליה ישיר ניקור Sequential urine & prostate Catheter צנרת
Ileal conduits אלעצמי צנרת urine MSU

לאבחנה/טיפול

חשד לזיהום בדרכי השתן

שיטת ביצוע הבדיקה

תרבית (מצעים מוצקים). זיהוי בשיטת Bruker TOF MALDI. רגישות בשיטה אוטומטית ובשיטות Disk
Diffusion וב-Gradient Test.

מגבלות השיטה

דיגום בהתוויה לא מתאימה עלול להביא לטיפול אנטיביוטי מיותר. יש לדגום בגישה סטרילית ככל הניתן
, בחולים עצמאיים להדגיש את נטילת אמצע הזרם

הערות

הערות

אין

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

יש לציין במדיוק את אתר הדיגום

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

ניקוי וחיטוי על פי שיטת הדיגום, בהמלצת היחידה למניעת זיהומים

סוג הדגימה

שתן

נפח דגימה

לפחות 3 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת Diaslide acid Boric מצה"ל

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

תנאי שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשרלקוחות חוץ: ביום הדיגום

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

תרבות - תחום הערכים לא ישים. שיטת TOF MALDI - תחום הערכים לא ישים. רגישות בשיטה
אוטומטית ובשיטת Disk Diffusion - ניתן לפנות למסמך Standards Performance:100-M CLSI
Application for Antimicrobial Susceptibility Testing. Gradient Test - ניתן לפנות ל-E-Test Application
Guide. פריט לכל מצורפות השימוש ולהוראות.

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

יש

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

תרבות שלילית - 3 ימים/תרבות חיובית - 5 ימים



ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

קליטה ועיבוד עד שעה 19:00