

Mycobacteria כיח: תרבית

תיאור הבדיקה

קוד CPT

87116

שם הבדיקה

Mycobacteria כיח: תרבית

שמות נוספים לבדיקה

מגורה שאיבה כיח: Sputum Endotracheal aspiration
מטרכיאוסטומיה Mycobacterium MOTTNTMTB Tuberculosis שחפת

לאבחנה/טיפול

חשד לזיהום במיקובקטריה

שיטת ביצוע הבדיקה

צביעת Fast Acid ידנית או במכשיר Aerospray תרבית במצע מוצק Jensen-Lowenstein תרבית
במצע נוזלי במכשיר BD MGIT זיהוי בשיטת Bruker TOF-MALDI רגישות ב-Sensititre ל-Rapid &
slow growing mycobacteria

מגבלות השיטה

אין

הערות

הערות

אין

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

אין

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

לא רוק. כיח ראשון של הבוקר משיעול עמוק לאחר שטיפה יסודית של הפה בסלין/מים סטריליים

סוג הדגימה

שלוש דגימות שנלקחו במרווח מינימלי של 8 שעות.

נפח דגימה

לפחות 2 מ"ל, אופטימלי 10 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

כיח - כוסית סטרילית שאיבה מטובוס - מבחנה מערכה ייעודית לשאיבה

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

קירור : $8^{\circ} - 2^{\circ} \text{C}$

תנאי שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדר, מהר ככל האפשר לקוחות חוץ: מהר ככל האפשר בקירור: $8^{\circ} - 2^{\circ} \text{C}$

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשר לקוחות חוץ: עד 48 שעות מהדיגום

קריאת תוצאות

מידע כללי

אין

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

תרבית וצביעת fast Acid - לא רלוונטי. זיהוי בשיטת TOF-MALDI - לא רלוונטי. רגישות ב-Sensititre
ניתן לפנות למסמך Mycobacteria of Testing Susceptibility fore Standards Performance
Nocardia spp., and Other Aerobic Actinomycetes

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

יש

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמך/מתעיד

אין

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

70 ימים



ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא