

Mycobacteria :תרבית BAL

תיאור הבדיקה

CPT קוד

87116

שם הבדיקה

Mycobacteria :תרבית BAL

שמות נוספים לבדיקה

Bronchial- Alviolar Lavage MycobacteriumMOTTNTMTBTuberculosisשפחת

לאבחנה/טיפול

חשד לזיהום במיקובקטריה

שיטת ביצוע הבדיקה

צביעת Fast Acid ידנית או במכשיר Aerospray תרבית במצע מוצק Jensen-Lowenstein ותרבית
במצע נוזלי במכשיר BD MGIT זיהוי בשיטת Bruker TOF-MALDI רגישות ב-Sensititre ל-Rapid &
slow growing mycobacteria

מגבלות השיטה

הערות

הערות

אין

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

בפרוצדורה פולשנית

סוג הדגימה

BAL

נפח דגימה

לפחות 3 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה סטרילית או כלי ייעודי לשאיבה

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

קירור : $8^{\circ} - 2^{\circ} \text{C}$

תנאי שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדר, מהר ככל האפשר לקוחות חוץ: מהר ככל האפשר בקירור: $8^{\circ} - 2^{\circ} \text{C}$

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשר לקוחות חוץ: עד 48 שעות מהדיגום

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

תרבית וצביעת fast Acid - לא רלוונטי. זיהוי בשיטת TOF-MALDI - לא רלוונטי. רגישות ב-Sensititre ניתן לפנות למסמך Mycobacteria of Testing Susceptibility fore Standards Performance ,Nocardia spp., and Other Aerobic Actinomycetes

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

יש

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמך/מתעיד

אין

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

70 ימים



ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא