

קיבה מיץ :תרבית Mycobacteria

תיאור הבדיקה

CPT קוד

87116

שם הבדיקה

קיבה מיץ :תרבית Mycobacteria

שמות נוספים לבדיקה

Gastric fluid MycobacteriumMOTTNTMTBTuberculosisשפת

לאבחנה/טיפול

חשד לזיהום במיקובקטריה

שיטת ביצוע הבדיקה

צביעת Fast Acid ידנית או במכשיר Aerospray תרבית במצע מוצק Jensen-Lowenstein תרבית
במצע נוזלי במכשיר BD MGIT זיהוי בשיטת Bruker TOF-MALDI רגישות ב-Sensititre ל-Rapid &
slow growing mycobacteria

מגבלות השיטה

יש לתאפ עם המעבדה לא מבצעים צביעה למתגים יציבי חומצה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

לא יבוצע ללא תאום מראש עם המעבדה. לא מבצעים צביעת יציבי חומצה

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

יש לתאם מראש עם המעבדה מיץ קיבה מהבוקר לפני ארוחה.

סוג הדגימה

מיץ קיבה הדגימה צריכה להגיע למעבדה תוך שעה. אם לא ניתן תוך שעה, הוסף 100 מ"ג של sodium carbonate במעבדה להשיג ניתן אותו carbonate

נפח דגימה

10-15 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

כוסית סטרילית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

קירור : 8°C - 2°C

תנאי שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדר, מהר ככל האפשר לקוחות חוץ: מהר ככל האפשר בקירור: 8°C - 2°C

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשר לקוחות חוץ: עד 48 שעות מהדיגום

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

תרבות וצביעת fast Acid - לא רלוונטי. זיהוי בשיטת TOF-MALDI - לא רלוונטי. רגישות ב-Sensititre ניתן לפנות למסמך Mycobacteria of Testing Susceptibility fore Standards Performance, Nocardia spp., and Other Aerobic Actinomycetes

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

יש

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

אין

שם הגוף המסמך/מתעיד

אין

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

70 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא