

# Galactomannan in BALGalactomannan in serum

## תיאור הבדיקה

### **קוד CPT**

86060

### **שם הבדיקה**

Galactomannan in BALGalactomannan in serum

### **שמות נוספים לבדיקה**

אספרגילוסגלקטומןAspergillus Galactomannan

### **לאבחנה/טיפול**

חשד לאספרגילוזיס

### **שיטת ביצוע הבדיקה**

CLIA - Chemiluminescent microparticle immunoassay

### **מגבלות השיטה**

אין

## הערות

**הערות**

אין

**פרטי מעבדה מבצעת**

**מעבדה מבצעת**

**מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית**

**מיקום המעבדה**

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

**טלפון למידע, בירורים ותיאום**

03-5302305

**מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה**

אין

**המעבדה הקולטת את הדגימה**

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

**האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?**

לא

**דיגום ושינוע הבדיקה**

### **תנאים והכנת החולה לפני הדיגום**

הבדיקה מושפעת מנוכחות תרופות וחומרים אחרים.

#### **סוג הדגימה**

סרום BAL

#### **נפח דגימה**

5 מ"ל של דם / BAL

#### **כלי קיבול לדגימה**

דם במבחנה כימית, פקק צהוב. BAL במבחנה סטרילית

#### **תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע**

קירור :  $2^{\circ} - 8^{\circ} C$ , מעל 24 שעות יש להקפיא דגימות BAL ב-70 C

#### **תנאי שינוע**

לקוחות פנים : מהר ככל האפשר בטמפ חדר. לקוחות חוץ: קירור 2-8C, ברונכואלואורית BAL בהקפאה

#### **זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה**

לקוחות פנים: מהר ככל האפשר לקוחות חוץ: עד 48 שעות מהדיגום

### **קריאת תוצאות**

#### **מידע כללי**

אין

**יחידת מידה**

Index

**תחום ערכים תקינים**

פחות מ-0.16

בקורות ותקני איכות

**בקרת איכות חיצונית - EQA**

יש

**בקרת איכות חיצונית חלופית**

אין צורך

**הסמכה/התעדה**

ISO15189:2022

**שם הגוף המסמיך/מתעיד**

????? ?????????? ??????? ???????

מועדי דיגום ותוצאות

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

3 ימים

**ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

לא