

Activated partial thromboplastin time (PTT)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

85730

שם הבדיקה

Activated partial thromboplastin time (PTT)

שמות נוספים לבדיקה

(PTT) מופעל חלקי טרומבופלסטין זמן , partial thromboplastin time

לאבחנה/טיפול

תפקודי קרישה

שיטת ביצוע הבדיקה

ACLTOPClot detection photometry

מגבלות השיטה

המוליזה וליפמיה חזקה משפיעות על תוצאת הבדיקה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

בימי חול משעה 08:00 עד 14:00 03-530-3671 במשמרות: 03-5302100 או 03-5302747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

בגלל השפעת הפרין על תפקודי קרישה נא לדגום כשעתיים אחרי טיפול בהפרין

סוג הדגימה

פלסמה (Citrata Na)

נפח דגימה

עד הקו המסומן על המבחנה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת Citrate Na פקק תכלת

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

להקפיד על יחס נוגד קרישה-דם (לפי הקו המסומן). לערבב היטב בהיפוך איטי (5 פעמים), ללא הקצפה. לאחר הלקיחה יש לשלוח למעבדה תוך 4 שעות בטמפרטורת החדר.

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

עד 8 שעות

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

שניות

תחום ערכים תקינים

26-40 ז/נ:

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

ECAT

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 60 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7