

Albumin-blood

תיאור הבדיקה

CPT קוד

82040

שם הבדיקה

Albumin-blood

שמות נוספים לבדיקה

דם-אלבומין, Albumin

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

Colorimetric (BCG) (AU5800)

מגבלות השיטה

תתכן הפרעה בגלל המוליזה או ליפמיה חזקה
especially, gammopathy cases rare very
monoclonal IgM (Waldenström's macroglobulinemia), may cause unreliable results.

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

על-אוטומטית

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לשמור בטמפרטורת החדר ולשלוח באותו יום של הלקיחה. אם לא נשלח באותו יום הלקיחה חייב הפרדה מוחלטת של הסרום מהתאים.

תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

7 ימים בטמפרטורה החדרודש בטמפרטורה 2-8°C

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

g/dl

תחום ערכים תקינים

3.6 - 5.5 ז/נ:

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

EQAS- Clinical Chemistry (Monthly) Program

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 90 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7