

Aspartatetransaminase(SGOT, AST)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

84450

שם הבדיקה

Aspartatetransaminase(SGOT, AST)

שמות נוספים לבדיקה

אספרטט, Aspartate Transaminase, Serum Glutamic-Oxaloacetic Transaminase, טרנסאמינאז (AST, SGOT)

לאבחנה/טיפול

תפקודי כבד

שיטת ביצוע הבדיקה

Kinetic (w/o Pyridoxal Phosphhate) (AU5800)

מגבלות השיטה

המוליזה וליפמיה חזקה משפיעות על תוצאת הבדיקה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

לא לדגום לאחר פעילות גופנית אינטנסיבית

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לשמור בטמפרטורת החדר ולשלוח באותו יום הלקיחה. אם לא נשלח באותו יום חייב הפרדה מוחלטת מהתאים.

תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

4 ימים בטמפרטורה החדר ימים 8 בטמפרטורה 2-8°C

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

IU/l

תחום ערכים תקינים

7 - 45 ז/נ

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

EQAS- Clinical Chemistry (Monthly) Program

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 90 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7