

Base Excess

תיאור הבדיקה

קוד CPT

82803

שם הבדיקה

Base Excess

שמות נוספים לבדיקה

עודף בסיס

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

Rapid Point 500 Calculated

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

מבוצע רק במסגרת פנל הגזים

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

דם מלא

נפח דגימה

2 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מזרק המכיל הפרין יעודי לבדיקות גזים סגור היטב בסגר ייעודי

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לקיחה ללא חשיפה לאויר, סגור מיד בסגר פלסטי, לשלח מיד למעבדה לאחר הלקיחה

תנאי שינוע

אם נישלח מיד לאחר הלקיחה, ניתן לשלוח בטמפרטורת החדר. אם לא נשלח מייד לאחר הלקיחה יש להצמיג לקרח ולשלוח תוך 20 דקות

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

30 דקות

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

mmol/l

תחום ערכים תקינים

ז/נ (עורקי) עד 3 חודשים: 7 (-) - 1-1-2/נ (עורקי): מעל 3 חודשים עד 10 שנים: 4-(-)-2/נ (עורקי): מעל 10 שנים: 2-(-)-3

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

RIQAS -Blood Gas/ Oximetry

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 30 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7