

Calcium- urine

תיאור הבדיקה

קוד CPT

82340

שם הבדיקה

Calcium- urine

שמות נוספים לבדיקה

סידן בשתן

לאבחנה/טיפול

מטרת הבדיקה היא לצורך אבחון וניטור מגוון רחב של מצבים המתייחסים לבריאות העצם, הלב, מערכת העצבים, הכליות...

שיטת ביצוע הבדיקה

Colorimetric Arsennazo III(AU5800)

מגבלות השיטה

הערות

הערות

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

שתן

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת שתן פקק שקוף

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

אסוף שתן של 24 שעות ללא תוסף או שתן אקראי

תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

2 ימים בטמפרטורה החדר 4 ימים בטמפרטורה $2-8^{\circ}\text{C}$

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

mg/dlmg/24 hmg/g creat.

תחום ערכים תקינים

תלוי בגיל/איסוף או שתן אקראי/מנורמל לקריאטינין. מפורט בדוח תוצאות

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

EQAS-Urine Chemistry Program

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

90 עד דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7