

Cholesterol-HDL

תיאור הבדיקה

קוד CPT

80061

שם הבדיקה

Cholesterol-HDL

שמות נוספים לבדיקה

כולסטרול-HDL

לאבחנה/טיפול

חלק מפרופיל ליפידים

שיטת ביצוע הבדיקה

Enzymatic colorimetric(AU5800)

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

צום 12 שעות לפני הבדיקה

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לשמור בטמפרטורת החדר ולשלוח באותו יום של הלקיחה. אם לא נשלח באותו יום חייב הפרדה מוחלטת של הסרום מהתאים.

תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

יומיים בטמפרטורה החדר 7 ימים בטמפרטורה 2-8°C

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

mg/dl

תחום ערכים תקינים

נקבה: גדול מ-55 זכר: גדול מ-45

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

EQAS- Clinical Chemistry (Monthly) Program

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 90 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7