

Circulating anticoagulant (SCT)

תיאור הבדיקה

CPT קוד

L0934

שם הבדיקה

Circulating anticoagulant (SCT)

שמות נוספים לבדיקה

(SCT) לופוס קרישה נוגד, (LAC) Lupus anticoagulant

לאבחנה/טיפול

חלק מבדיקות לבירור של הגורמים לקרישיות יתר

שיטת ביצוע הבדיקה

ACLTOPClot detection photometry

מגבלות השיטה

המוליזה וליפמיה חזקה משפיעות על תוצאת הבדיקה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

על-אוטומטית

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

בימי חול משעה 08:00 עד 14:00: 03-530-3671

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

חייב אישור של רופא מומחה קרישה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

פלסמה (Citrates Na)

נפח דגימה

עד הקו המסומן על המבחנה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת Citrate Na פקק תכלת

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

להקפיד על יחס נוגד קרישה-דם (לפי הקו המסומן). לערבב היטב בהיפוך איטי (5 פעמים), ללא הקצפה. לאחר הלקיחה יש לשלוח למעבדה תוך 3 שעות בטמפרטורת החדר.

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

בטמפרטורה החדר תוך 4 שעותפלסמה מוקפא בטמפרטורה -80°C עד שישה חודשים

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

ratio

תחום ערכים תקינים

ז/נ קטן מ 1.22

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

ECAT

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד שבועיים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בימי חול בין השעות 07:00 עד 15:00