

# coagulation Factor XI activity

## תיאור הבדיקה

**CPT קוד**

85270

**שם הבדיקה**

coagulation Factor XI activity

**שמות נוספים לבדיקה**

פעילות פקטור קרישת XI

**לאבחנה/טיפול**

תפקודי קרישה

**שיטת ביצוע הבדיקה**

ACLTOPClot detection photometry

**מגבלות השיטה**

המוליזה וליפמיה חזקה משפיעות על תוצאת הבדיקה

## פרטי מעבדה מבצעת

**מעבדה מבצעת**

על-אוטומטית

### מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

### טלפון למידע, בירורים ותיאום

בימי חול משעה 08:00 עד 14:00: 03-530-3671

### מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

חייב אישור של רופא מומחה קרישה. הפעלת כונן מעבר לשעות העבודה

### המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

### האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

### דיגום ושינוע הבדיקה

#### תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

#### סוג הדגימה

פלסמה (Citrate Na)

#### נפח דגימה

עד הקו המסומן על המבחנה

## כלי קיבול לדגימה

מבחנת Citrate Na פקק תכלת

## תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

להקפיד על יחס נוגד קרישה-דם (לפי הקו המסומן). לערבב היטב בהיפוך איטי (5 פעמים), ללא הקצפה. לאחר הלקיחה יש לשלוח למעבדה תוך 3 שעות בטמפרטורת החדר.

## תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

בטמפרטורה החדר תוך 4 שעותפלסמה מוקפא בטמפרטורה  $-80^{\circ}\text{C}$  עד שישה חודשים

## קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

%

תחום ערכים תקינים

ז/נ: 65-150

## בקורות ותקני איכות

**בקרת איכות חיצונית - EQA**

ECAT

**בקרת איכות חיצונית חלופית**

**הסמכה/התעדה**

ISO15189

**שם הגוף המסמיך/מתעיד**

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

**מועדי דיגום ותוצאות**

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

עד שבועיים

**ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

בימי חול בין השעות 07:00 עד 15:00