

Creatine phosphokinase total (CPK)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

82550

שם הבדיקה

Creatine phosphokinase total (CPK)

שמות נוספים לבדיקה

סך קריאטין פוספוקינאז (CPK)

לאבחנה/טיפול

אבחון ומעקב תפקוד השרירים

שיטת ביצוע הבדיקה

Kinetic UV test (AU5800)

מגבלות השיטה

המוליזה גורמת לעליה ניכרת בערך הנמדדהפרעה בגלל ליפמיה ואיקטריה חזקה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

על-אוטומטית

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

יש להמנע מדיגום אחרי פעילות גופנית נמרצת

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לשמור בקרור ולשלוח באותו יום של הלקיחה. אם לא נשלח באותו יום חייב הפרדה מוחלטת מהתאים.

תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

4 שעות בטמפרטורת החדר 12-8 שעות בטמפרטורה 2-8°C

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

IU/L

תחום ערכים תקינים

זכר: קטן מ-190 נקבה: קטן מ-170

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

EQAS- Clinical Chemistry (Monthly) Program

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 90 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7