

Hepatitis A antibody IgM

תיאור הבדיקה

CPT קוד

86709

שם הבדיקה

Hepatitis A antibody IgM

שמות נוספים לבדיקה

הפטיטיס A נוגדן IgM

לאבחנה/טיפול

הידבקות בצהבת נגיפית מסוג A

שיטת ביצוע הבדיקה

ARCHITECT i2000srImmunometric-Chemiluminescence(CMIA)

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

בימי חול משעה 08:00 עד 14:00: 03-530-8161

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

במקרה ומתקבלת תוצאה גבולית או חיובית הדגימה מועברת להמשך ברור למעבדת זיהומיות

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

ניתן לשמור בטמפרטורת החדר אם נשלח באותו יום של הלקיחה. דגימות שאינן נשלחות ביום הלקיחה יש להפריד את הסרום מהתאים ולשמר בקרור $2-8^{\circ}\text{C}$ עד 7 ימים. מעל 7 ימים יש להקפיא ב- -20° .

תנאי שינוע

באותו יום הלקיחה לשלוח בטמפרטורת החדר. אם לא נשלח באותו יום הלקיחה יש לשלוח בקרור.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לאחר הפרדת סרום מהתאים עד 7 ימים בטמפרטות $2-8^{\circ}\text{C}$. מעל 7 ימים בהקפאה - 20° -

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

S/CO

תחום ערכים תקינים

שלילי: קטן מ- 0.8 גבולי: גדול מ- 0.8 עד 1.2 חיובי: גדול מ- 1.2

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

Labquality

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 3 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

ביצוע מעבר לשעות העבודה חייב אישור של רופא בכיר מומחה כבד והפעלת כונן מגה