

Homocysteine

תיאור הבדיקה

CPT קוד

83090

שם הבדיקה

Homocysteine

שמות נוספים לבדיקה

הומוציסטאין

לאבחנה/טיפול

זיהוי של חולים בסיכון למחלות לב, שבץ מוחי או קרישיות יתר.

שיטת ביצוע הבדיקה

Two step: Reduction and Enzymatic Conversion (AU5800)

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אחרי צום 8 שעות

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לשלוח מייד לאחר הלקיחה. דגימות שאינן נשלחות מייד לאחר הלקיחה, יש לשמור צמוד לקרח עד 6 שעות. דגימות שאינן נשלחות ביום הלקיחה יש להפריד את הסרום ולשמר בקרור $2-8^{\circ}\text{C}$ עד 7 ימים.

תנאי שינוע

לשלוח צמוד קרח.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

7 ימים בטמפרטורה $2-8^{\circ}\text{C}$

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

umol/L

תחום ערכים תקינים

ז/נ: 5-15

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

EQAS-CARDIAC MARKERS PROGRAM

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

90 עד דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7