

Lipoprotein (a)[Lp(a)]

תיאור הבדיקה

קוד CPT

82172

שם הבדיקה

Lipoprotein (a)[Lp(a)]

שמות נוספים לבדיקה

ליפופרוטאין [(a) Lp](a)

לאבחנה/טיפול

שכיחות מחלות לב טרשתיות

שיטת ביצוע הבדיקה

Immuno Turbidimetric (AU5800)

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

צום 12 שעות לפני הבדיקה

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

ניתן לשמור בטמפרטורת החדר אם נשלח באותו יום של הלקיחה. לדגימות שאינן נשלחות ביום הלקיחה יש להפריד את הסרום ולשמר בקרור 4°C עד 48 שעות.

תנאי שינוע

באותו יום של הלקיחה ניתן לשלוח בטמפרטורת החדר. דגימות הנשלחות מחוץ לשיבא יש לשלוח בקירור 4°C .

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

7 ימים בטמפרטורה $2-8^{\circ}\text{C}$

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

mg/dl

תחום ערכים תקינים

ז/נ: 5-50

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

EQAS LIPID PROGRAM

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 5 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

מבוצע בימי חמישי