

NT-proBNP

תיאור הבדיקה

קוד CPT

803880

שם הבדיקה

NT-proBNP

שמות נוספים לבדיקה

לב ספיקת לאי סמן, Brain Natriuretic Peptide

לאבחנה/טיפול

סיוע באבחון ומעקב אי ספיקת לב

שיטת ביצוע הבדיקה

ARCHITECT i2000srImmunometric-Chemiluminescence(CMIA)

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

בימי חול משעה 08:00 עד 14:00: 03-530-8161

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

עבור מטופלים מאושפדים חייב אישור רופא מומחה קרדיולוג

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

ניתן לשמור בטמפרטורת החדר אם נשלח באותו יום של הלקיחה. דגימות שאינן נשלחות ביום הלקיחה יש להפריד את הסרום מהתאים ולשמר בטמפרטורת החדר עד 3 ימים. בין 3 מים ל 6 ימים יש לשמור -80°C ב- להקפיא יש ימים 6 מעל. $2-8^{\circ}\text{C}$

תנאי שינוע

באותו יום הלקיחה לשלוח בטמפרטורת החדר. אם לא נשלח באותו יום הלקיחה יש לשלוח בקרור.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לאחר הפרדת סרום מהתאים: בטמפרטורת החדר: 3 ימים. בטמפרטורת $2-8^{\circ}\text{C}$ עד 6 ימים. בקפאה -80°C עד שנה.

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

pg/ml

תחום ערכים תקינים

ז/נ עד גיל 75 קטן מ-125 ז/נ מגיל 76 קטן מ-450

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

EQAS-CARDIAC MARKERS PROGRAM

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 3 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

מבוצע רק במשמרת בוקר