

Pradaxa- dabigatran

תיאור הבדיקה

קוד CPT

80299

שם הבדיקה

Pradaxa- dabigatran

שמות נוספים לבדיקה

direct thrombin inhibitor DTI, Pradaxa- dabigatran

לאבחנה/טיפול

רמת תרופה

שיטת ביצוע הבדיקה

ACLTOPClot detection photometry

מגבלות השיטה

המוליזה וליפמיה חזקה משפיעות על תוצאת הבדיקה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

על-אוטומטית

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

בימי חול משעה 08:00 עד 14:00 03-530-3671 במשמרות: 03-5302100 או 03-5302747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

חייב אישור של רופא מומחה קרישה. הפעלת כונן מעבר לשעות העבודה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

פלסמה (Citrate Na)

נפח דגימה

עד הקו המסומן על המבחנה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת Citrate Na פקק תכלת

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

להקפיד על יחס נוגד קרישה-דם (לפי הקו המסומן). לערבב היטב בהיפוך איטי (5 פעמים), ללא הקצפה. לאחר הלקיחה יש לשלוח למעבדה תוך 4 שעות בטמפרטורת החדר.

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

בטמפרטורה החדר תוך 4 שעותפלסמה מוקפא בטמפרטורה -80°C עד שישה חודשים

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

ng/ml

תחום ערכים תקינים

מדידת רמת תרופה בדם

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

ECAT

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

ביום הקבלה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בימי חול בין השעות 07:00 עד 15:00