

PSA-Total

תיאור הבדיקה

קוד CPT

84153

שם הבדיקה

PSA-Total

שמות נוספים לבדיקה

Prostate Specific Antigen (PSA), PSA

לאבחנה/טיפול

סמן לסרטן ערמונית

שיטת ביצוע הבדיקה

Dxl 800Immunometric-Chemiluminescence

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

לפני כל מניפולציה בבלוטת הערמונית כגון משוש או ביופסיה

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

חובה להפריד את הסרום מהתאים תוך 3 שעות. דגימות שאינן נשלחות ביום הלקיחה יש להפריד את הסרום מהתאים תוך 3 שעות מהלקיחה ולשמור את הסרום בטמפרטורת $2-8^{\circ}\text{C}$ עד 24 שעות או להקפיא בטמפרטורת -20°C ולשלוח בהקפאה.

תנאי שינוע

יש לשלוח את הדגימה תוך 3 שעות מהלקיחה. אם לא נשלח תוך 3 שעות מהלקיחה יש להפריד את הסרום מהתאים ולשלוח תוך 24 שעות בקרור $2-8^{\circ}\text{C}$ או בהקפאה -20°C .

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לאחר הפרדת הסרום מהתאים: עד 24 שעות בטמפרטורה $2-8^{\circ}\text{C}$. מעל 24 שעות בהקפאה ב- -20°C .

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

ng/ml

תחום ערכים תקינים

עד גיל 49: קטן מ- 2.5 גיל 50-59: קטן מ- 3.5 גיל 60-69: קטן מ- 4.5 גיל 69

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

EQAS IMMUNOASSAY

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 120 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7