

Ristocetin cofactor von Willebrand activity

תיאור הבדיקה

קוד CPT

85245

שם הבדיקה

Ristocetin cofactor von Willebrand activity

שמות נוספים לבדיקה

בילברנד פון של Ristocetin של פעילות, von Willebrand factor

לאבחנה/טיפול

תפקודי קרישה

שיטת ביצוע הבדיקה

ACLTOPImmuno-agglutination

מגבלות השיטה

המוליזה וליפמיה חזקה משפיעות על תוצאת הבדיקה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

בימי חול משעה 08:00 עד 14:00: 03-530-3671

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

חייב אישור של רופא מומחה קרישה. הפעלת כוון מעבר לשעות העבודה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

פלסמה (Citrates Na)

נפח דגימה

עד הקו המסומן על המבחנה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת Citrate Na פקק תכלת

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

להקפיד על יחס נוגד קרישה-דם (לפי הקו המסומן). לערבב היטב בהיפוך איטי (5 פעמים), ללא הקצפה. לאחר הלקיחה יש לשלוח למעבדה תוך 3 שעות בטמפרטורת החדר.

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

בטמפרטורה החדר תוך 4 שעות פלסמה מוקפא בטמפרטורה -80°C עד שישה חודשים

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

%

תחום ערכים תקינים

50-160 אחר 40-130 typeO זנ:

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

ECAT

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד שבועיים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בימי חול בין השעות 07:00 עד 15:00