

T3, Free

תיאור הבדיקה

CPT קוד

84480

שם הבדיקה

T3, Free

שמות נוספים לבדיקה

Free Triiodothyronine, חופשי T3

לאבחנה/טיפול

תפקודי בלוטת תריס

שיטת ביצוע הבדיקה

Dxl 800Immunometric-Chemiluminescence

מגבלות השיטה

תתכן עליה משמו משמעותית לאחר נטילת ביוטין

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

ניתן לשמור בטמפרטורת החדר אם נשלח באותו יום של הלקיחה. דגימות שאינן נשלחות ביום הלקיחה יש להפריד את הסרום מהתאים וניתן לשמר בקרור $2-8^{\circ}\text{C}$ עד יומיים או בהקפאה בטמפרטורת -20°C -

תנאי שינוע

באותו יום הלקיחה לשלוח בטמפרטורת החדר. אם לא נשלח באותו יום הלקיחה יש ולשלוח בקרור.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לאחר הפרדת הסרום מהתאים: עד 8 שעות בטמפרטורת החדר מעל 8 שעות ו-48 עד שעות בטמפרטורת $2-8^{\circ}\text{C}$ מעל 48 שעות בהקפאה ב -20°C -

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

pmol/l

תחום ערכים תקינים

נ/ז 3 ימים עד שנתיים: 2.46-9.80 נ/ז מעל שנתיים: 3.3-7.2

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

EQAS IMMUNOASSAY

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 120 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7