

## Thrombin time (TT)

### תיאור הבדיקה

**קוד CPT**

85670

**שם הבדיקה**

Thrombin time (TT)

**שמות נוספים לבדיקה**

זמן תרומבין

**לאבחנה/טיפול**

תפקודי קרישה

**שיטת ביצוע הבדיקה**

ACLTOPClot detection photometry

**מגבלות השיטה**

המוליזה וליפמיה חזקה משפיעות על תוצאת הבדיקה

### פרטי מעבדה מבצעת

**מעבדה מבצעת**

על-אוטומטית

### מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

### טלפון למידע, בירורים ותיאום

בימי חול משעה 08:00 עד 14:00: 03-530-3671 במשמרות: 03-5302100 או 03-5302747

### מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

### המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

### האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

### דיגום ושינוע הבדיקה

#### תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

בגלל השפעת הפרין על תפקודי קרישה נא לדגום כשעתיים אחרי טיפול בהפרין

#### סוג הדגימה

פלסמה (Citrate Na)

#### נפח דגימה

עד הקו המסומן על המבחנה

## כלי קיבול לדגימה

מבחנת Citrate Na פקק תכלת

## תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

להקפיד על יחס נוגד קרישה-דם (לפי הקו המסומן). לערבב היטב בהיפוך איטי (5 פעמים), ללא הקצפה. לאחר הלקיחה יש לשלוח למעבדה תוך 4 שעות בטמפרטורת החדר.

## תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

עד 8 שעות

## קריאת תוצאות

### מידע כללי

### יחידת מידה

שניות

### תחום ערכים תקינים

ז/נ: 13-18

## בקורות ותקני איכות

**בקרת איכות חיצונית - EQA**

NEQAS

**בקרת איכות חיצונית חלופית**

**הסמכה/התעדה**

ISO15189

**שם הגוף המסמיך/מתעיד**

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

**מועדי דיגום ותוצאות**

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

עד 60 דקות

**ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

24/7