

Toxoplasma gondii IgM

תיאור הבדיקה

CPT קוד

706777

שם הבדיקה

Toxoplasma gondii IgM

שמות נוספים לבדיקה

טוקסופלסמה IgM

לאבחנה/טיפול

הימצאות בדם של נוגדנים מסוג M נגד הנגיף טוקסופלסמה , מצביעה על הדבקות בנגיף

שיטת ביצוע הבדיקה

ARCHITECT i2000srImmunometric-Chemiluminescence(CMIA)

מגבלות השיטה

המוליזה חזקה עלולה לשבש את המדידה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

על-אוטומטית

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

בימי חול משעה 08:00 עד 14:00: 03-530-8161

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

ניתן לשמור בטמפרטורת החדר אם נשלח באותו יום של הלקיחה. דגימות שאינן נשלחות ביום הלקיחה יש להפריד את הסרום מהתאים ולשמר בקרור $2-8^{\circ}\text{C}$ עד 14 ימים. מעל 14 ימים יש להקפיא ב- -20°C .

תנאי שינוע

באותו יום הלקיחה לשלוח בטמפרטורת החדר. אם לא נשלח באותו יום הלקיחה יש לשלוח בקרור.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לאחר הפרדת הסרום מהתאים: 3 ימים בטמפרטורה החדר. מעל 3 ימים ועד 14 יום בטמפרטורה -20°C ב- בהקפאה ימים 14 מעל. $2-8^{\circ}\text{C}$

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

Index Value

תחום ערכים תקינים

שלילי: קטן מ-0.5 תחום אפור: גדול או שווה מ 0.5 עד -0.59 חיובי: גדול או שווה מ-0.6

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

Labquality

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 3 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

מבוצע רק במשמרת בוקר