

Troponin I HS

תיאור הבדיקה

קוד CPT

84484

שם הבדיקה

Troponin I HS

שמות נוספים לבדיקה

טרופונין I

לאבחנה/טיפול

סמן לתפקוד שריר הלב

שיטת ביצוע הבדיקה

DxI 800Immunometric-Chemiluminescence

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

ניתן לשמור בטמפרטורת החדר אם נשלח באותו יום של הלקיחה. דגימות שאינן נשלחות ביום הלקיחה יש להפריד את הסרום מהתאים ולשמר בקרור $2-8^{\circ}\text{C}$ עד יומיים

תנאי שינוע

באותו יום הלקיחה לשלוח בטמפרטורת החדר. אם לא נשלח באותו יום הלקיחה יש ולשלוח בקרור.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לאחר הפרדת הסרום מהתאים: עד 4 שעות בטמפרטורה החדרמעל 4 שעות בטמפרטורה $2-8^{\circ}\text{C}$ עד 48 שעותמעל 48 שעות בהקפאה ב- -20°C עד 120 יום.

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

ng/L

תחום ערכים תקינים

נשים : קטן מ-12 גברים: קטן מ-20

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

EQAS-CARDIAC MARKERS PROGRAM

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 45 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7