

bronchial wash

תיאור הבדיקה

קוד CPT

שם הבדיקה

bronchial wash

שמות נוספים לבדיקה

ברונכוס שטיפת מנוזל ציטולוגית בדיקה, Bronchial lavage

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

משטח Cytospin, הכנת בלוק תאים וצביעת PAP

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[פתולוגיה/ציטולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין המעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302354

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

פתולוגיה/ציטולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

ראה/י נוהל שליחת חומר לפתולוגיה בגליון נפרד. חומר שלא מתקבל באותו יום - יש לשמור במקרר

סוג הדגימה

bronchial wash

נפח דגימה

כמה שיוצא

כלי קיבול לדגימה

קופסאות פלסטיק עם מכסה מתברג או מבחנה עם מכסה מתברג

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

להעביר מיידית למעבדה מלווה בספר חתימות. יש לשמור בקירור עד שינוע. אין להשתמש במערך הטילים.

תנאי שינוע

מערך השליחים בלבד מלווה בספר חתימות. אין לשלוח במערכת הפנאומטית.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

להעביר מיידית למעבדה. לשמור בקירור עד שינוע.

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

בדיקה איכותית

תחום ערכים תקינים

לא ישום

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

זמן מתן התשובה תלוי במורכבות המקרה ובבדיקות נוספות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות